



**Informační list výrobku** - verze 3 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 2015 & 2015 ELC

**Výrobek:** Pediatrické chodítko - bez kol/s koly



Zobrazený model: 2015ELC

### SPECIFIKACE

Hloubka: 38 cm  
Šířka: 49 cm  
Výška: 55–62 cm (2015)  
Výška: 57–65cm (2015ELC)

Hmotnost výrobku: 1,5 kg  
Max. hmotnost uživatele: 50 kg

### POPIS

Lehké chodítko vyrobené z hliníkových trubek, které jsou výškově nastavitelné tak, aby vyhovovalo většině uživatelů. Je k dispozici bez předních koleček (2015) nebo s předními kolečky (2015 ELC), které umožňují uživateli pohybovat chodítkem bez zvedání.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností v důsledku dlouhodobé nemoci nebo zotavování se po poranění či nemoci.

Chodítko je určeno jako pomůcka pro uživatele a poskytuje oporu při chůzi. Je navrženo tak, aby uživatel mohl chodit v co nejvzpřímenější pozici. Pro uživatele, kteří nejsou schopni chodítko uzvednout, jsou k dispozici otočná kolečka, díky nimž lze pomůcku při používání posunovat dopředu.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, konzultovali vhodnost chodítka pro vaše potřeby. Mohou vám také pomoci nastavit chodítko na správnou výšku a ukázat jeho správné použití.

Uživatel musí stát v půdorysu chodítka a posouvat ho tak, aby zadní část chodítka byla přibližně ve stejné úrovni jako chodidla uživatele. Uživatel pak musí vkročit dovnitř chodítka a proces zopakovat.

Uživatel musí mít dostatečně silnou horní část těla na to, aby zvedl / tlačil pomůcku dopředu a zároveň udržoval rovnováhu.

### NASTAVENÍ

V dolní části každé nohy jsou pružinové pojistky, které umožňují nastavit každou nohu na příslušnou výšku.

Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny nohy ve stejné výšce a že jsou pružinové pojistky před použitím ve správné pozici a zajištěny.

**Roma Medical Aids Ltd.**

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Vhodné pouze pro použití na rovných plochách. Buďte opatrní, když se pohybujete po nakloněné ploše.

Nepokoušejte se chodítko používat na schodech ani na eskalátorech.

Nepokoušejte se překonat obrubníky nebo překážky bez patřičné asistence.

Před použitím se vždy ujistěte, že je chodítko vyrovnané a vyvážené.

Na chodítku nepřenašejte tašky ani ostatní předměty.

Před použitím se ubezpečte, zda jsou všechny upevňovací prvky zajištěné a zda není konstrukce chodítka vystavena nadměrnému ohybu nebo pohybu. Přesvědčte se, že otočná kolečka (jsou-li osazena) volně otáčejí.

**ČIŠTĚNÍ**

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

**ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU**

Rám výrobku (kromě kol nebo úchytů na berle) je dodáván se zárukou 24 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

**PROBLÉMY/OTÁZKY**

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.

Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na chodítku.

**Roma Medical Aids Ltd.**

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

